



# TROVA LA TUA MASCHERINA

26 Maggio 2020

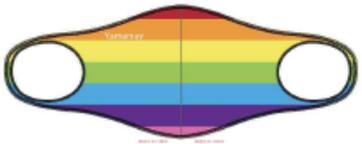

# La mascherina corretta

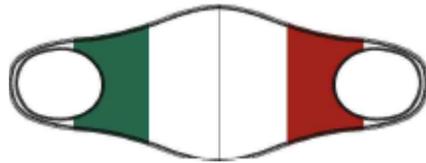


## Prendiamo le misure:

Hai bisogno dei seguenti strumenti:

- Un metro sartoriale
- Uno specchio
- Tabella taglia mascherina Yamamay

# La taglia corretta della mascherina

## Come ci automisuriamo per individuare la taglia corretta della nostra mascherina

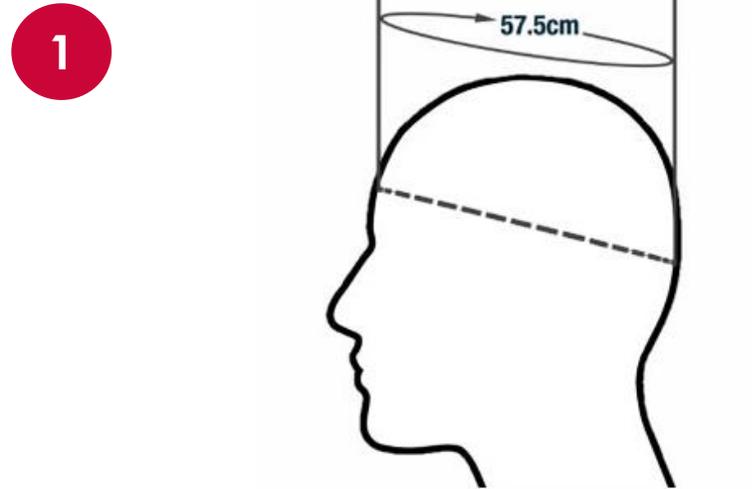

Le misure con il metro a nastro si prendono nel seguente modo:

- mettersi davanti allo specchio;
- posizionare il metro a nastro al centro della nuca e poi condurlo fino alla fronte, facendolo passare un centimetro sopra le orecchie;
- unire le estremità del metro a nastro al centro della fronte, senza stringere troppo;
- leggere nello specchio la misura della testa;
- convertire la misura rilevata in taglia osservando le tabelle di conversione di adulti e bambini.



# La taglia corretta – tabella misure mascherina facciale



**Circonferenza testa**

50-54 cm

54-56 cm

58-62 cm

**ITA**

XXS/XS

S/M

L/XL

# Descrizione prodotto



## Proprietà:

- Lavabile
- Idrorepellente
- Antibatterica
- Traspirante
- Tessuto in cotone a contatto con viso e bocca
- conforme alla norma EN14683
- rispetta tutti i requisiti ecotossicologici europei

## Manutenzione:

- lavabile in acqua a 30 gradi con prodotto disinfettante e riutilizzabile per 20 volte affinché mantenga sia il trattamento antibatterico che quello idrorepellente.
- Se lavata in acqua a 40 gradi può essere riutilizzata per 7 volte.
- La mascherina è venduta con la sua custodia in tessuto lavabile.

## Avvertenze e precauzioni:

- Si consiglia di indossare la mascherina in modo corretto, coprendo naso e bocca.
- Mantenere comunque la distanza minima di 1mt da altre persone.
- Lo smaltimento della mascherina avviene nei rifiuti indifferenziati.

**Grazie!**

pianoforte  

---

group

Yamamay CARPISA